

Afname van de PEDI-CAT op Q-global

Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of te scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze website.


Q-global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u zich inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (afbeelding 1):

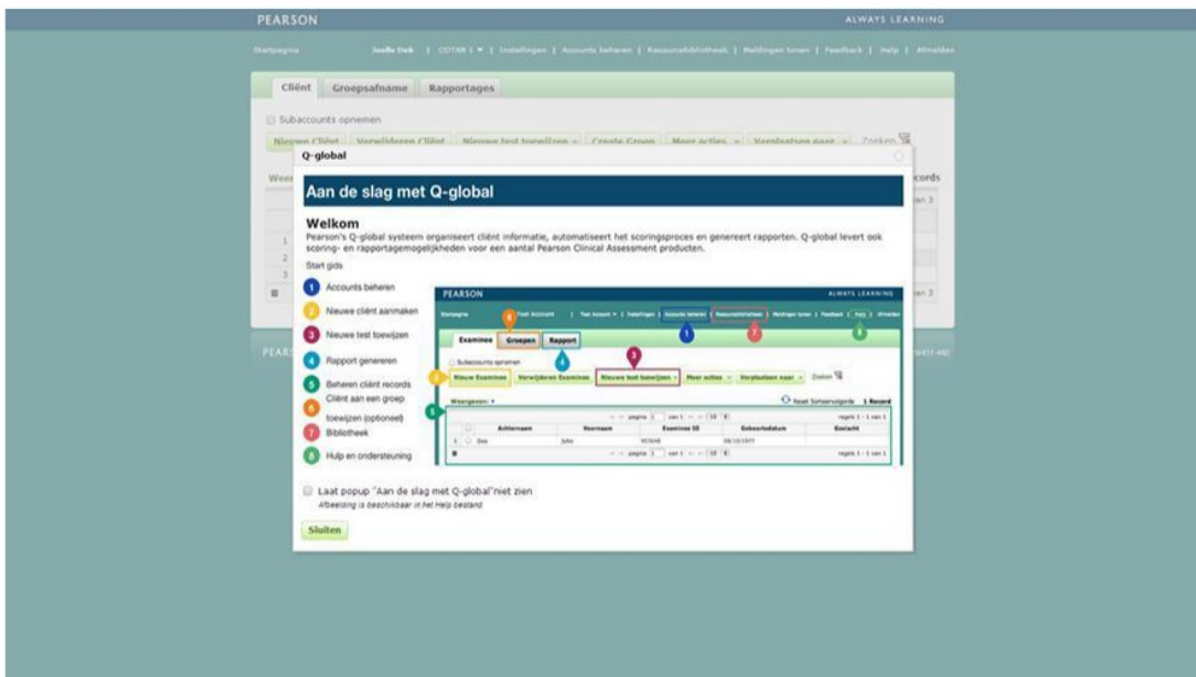


Afbeelding 1 Aan de slag met Q-global

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-global terecht (afbeelding 2).

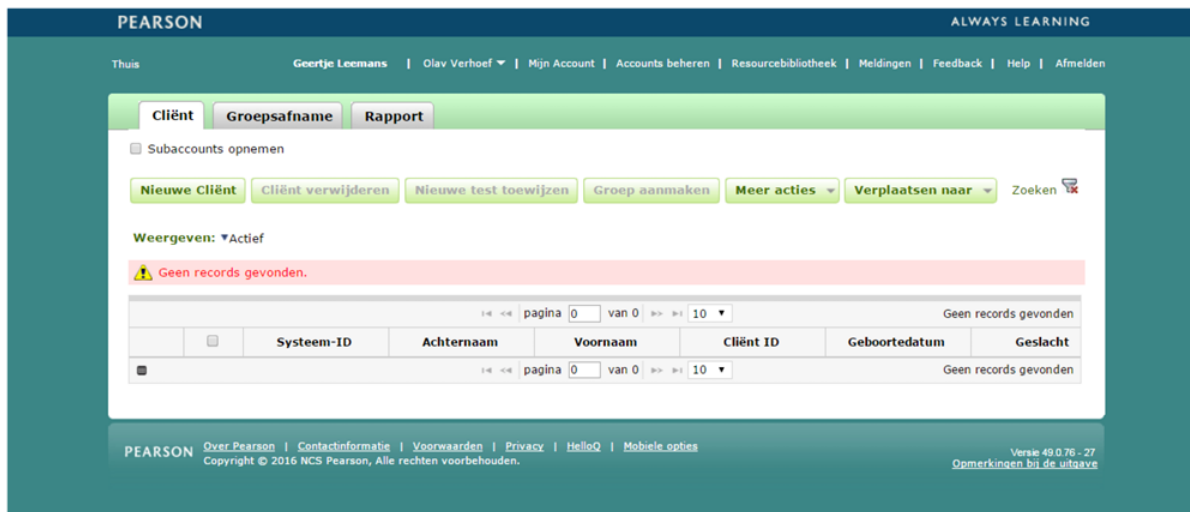

Afbeelding 2 Startpagina


Anmaken nieuwe cliënt

Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt;
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep

Afbeelding 3 Nieuwe cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (afbeelding 4).

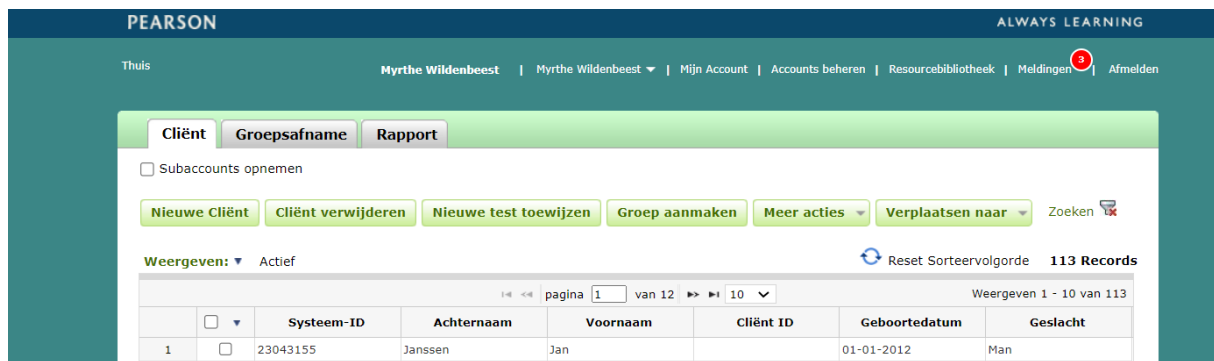

Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' linksboven in beeld (afbeelding 5).

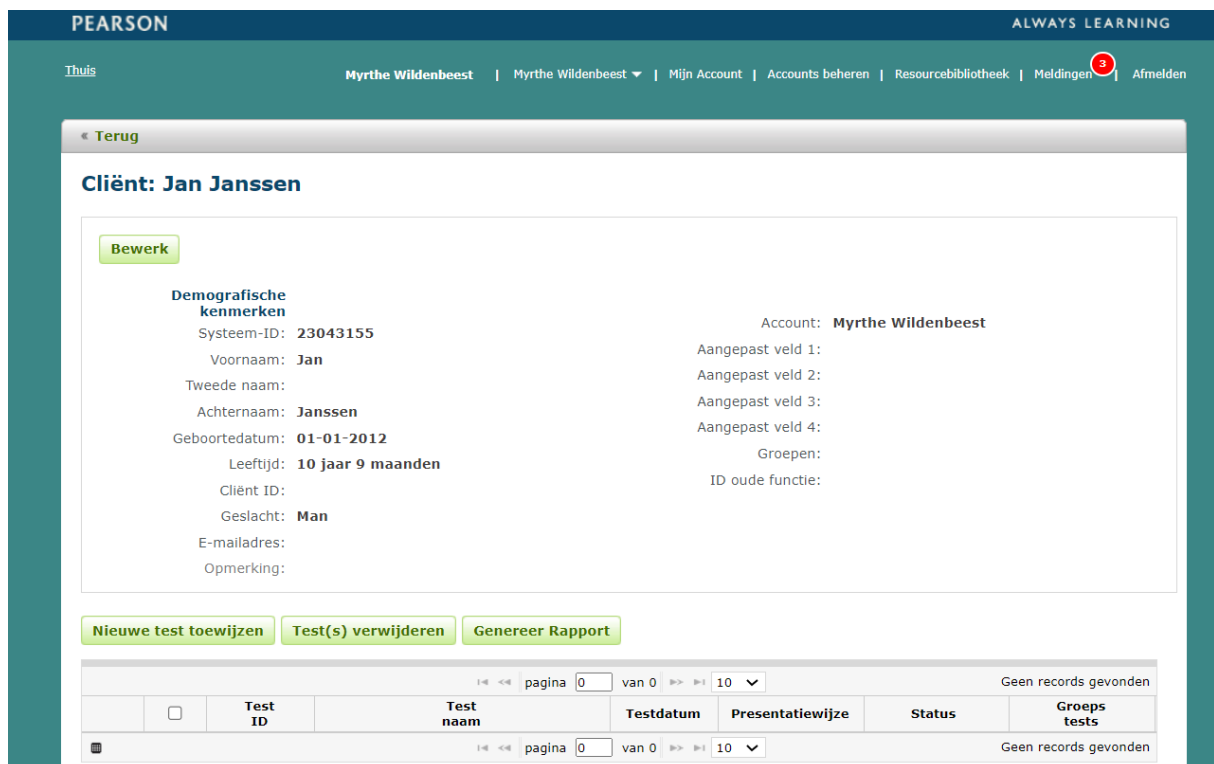

Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'- pagina

Test toewijzen


Op de startpagina vinkt u links vóór de client het hokje aan en kiest u 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de PEDI-CAT. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan. Daarna klikt u op 'Toewijzen' (afbeelding 6). U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.

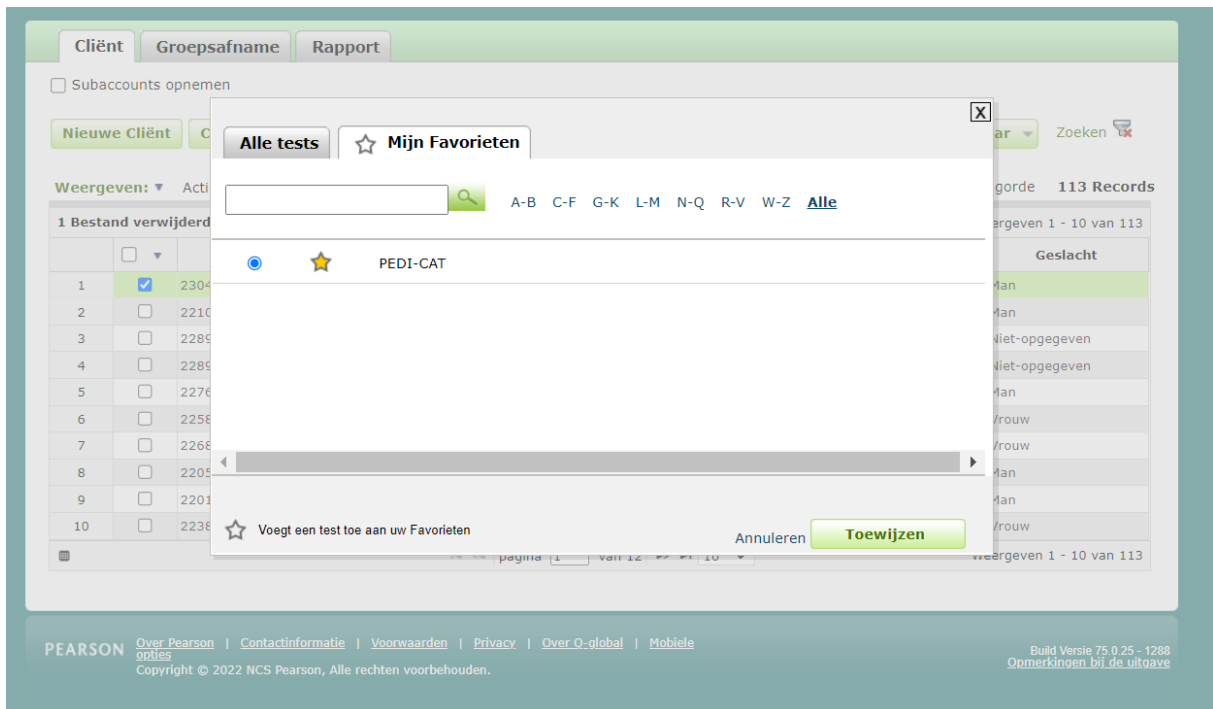

Afbeelding 6 Test toewijzen

Afname klaarzetten

Hierna komt u op de pagina Zet afname klaar. Bij Presentatiewijze-opties ziet u twee opties verschijnen (afbeelding 7).

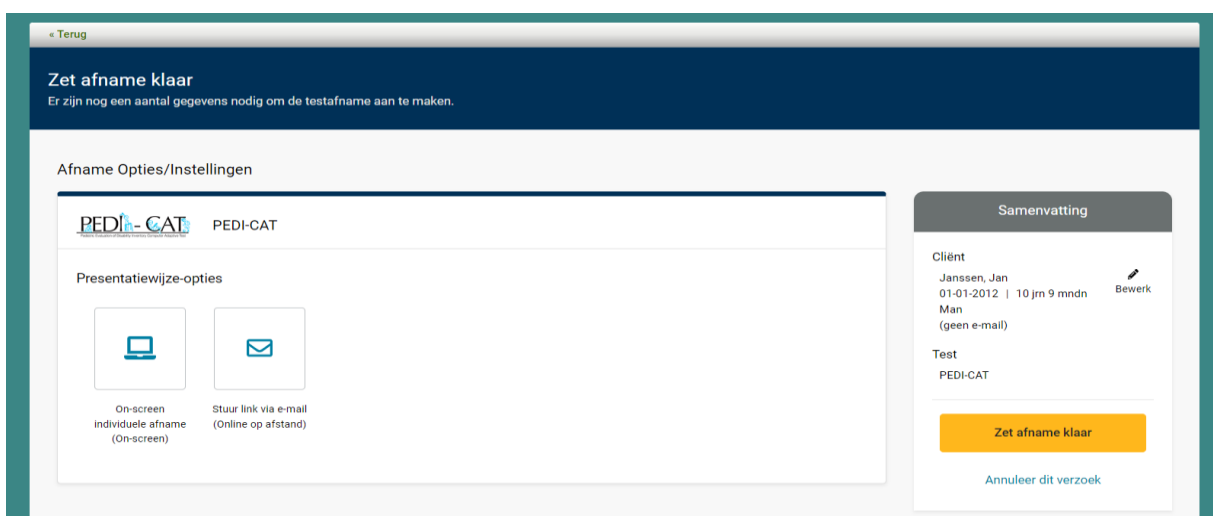

Afbeelding 7 Presentatiewijze-opties


U maakt een keuze uit:

- On-screen individuele afname (on-screen): een afname in een testruimte, eventueel met aanwezigheid van een onderzoeker.
- Stuur link via e-mail (online op afstand): een afname die door de cliënt thuis individueel wordt ingevuld. Hierbij ontvangt de cliënt een email en kan de vragenlijst via een link worden ingevuld.

In de volgende paragrafen volgt een instructie per presentatiewijze-optie.

On-screen individuele afname

Nadat u voor 'On-screen individuele afname' heeft gekozen, kunt u de afname verder klaarzetten. Onder Beeldscherm Instellingen kunt u kiezen voor 'Activeer testsessieslot' (wordt aangeraden). Indien geactiveerd kan uw cliënt tijdens en na de afname niet in uw computer en overige bestanden komen. Heeft u nog nooit het testsessieslot gebruikt, dan dient u deze eenmalig te installeren via de knop 'Download testsessieslot' (afbeelding 8). Als u het testsessieslot wil ontgrendelen, drukt u op Ctrl+ Shift + Q.

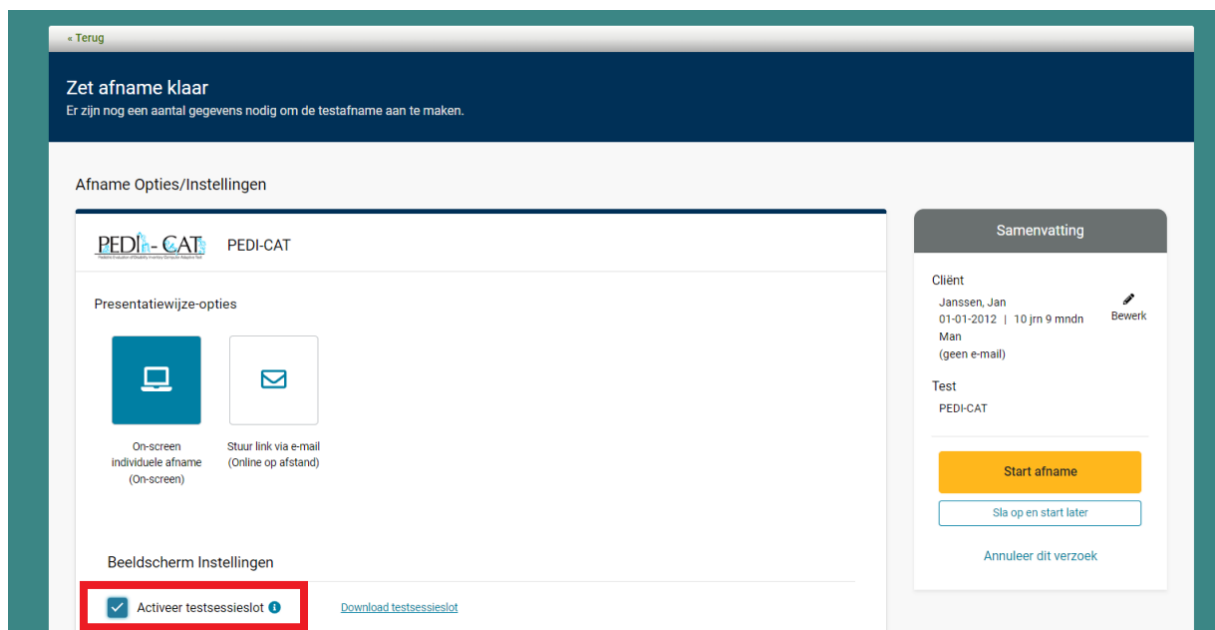

Afbeelding 8 Testsessieslot

Kies onder Afnamegegevens welke domeinen u wenst af te nemen. Per domein kunt u kiezen uit een content-balanced versie en een Speedy-CAT versie (afbeelding 13).

Afnamegegevens

Domeinen
Selecteer ten minste één domein voor deze afname.

	Niet	Speedy	Content Balanced
Dagelijkse activiteiten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobiliteit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sociaal/Cognitief	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verantwoordelijkheid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Afbeelding 9 Domeinselectie

Daarna vult u de overige gegevens in. Alleen de informatie onder 'Loophulpmiddel' is optioneel, de rest is verplicht om in te vullen (afbeelding 10).

Taal voor de afname
Nederlands

De persoon die dit invult: (optioneel)
 Ouder
 Andere verzorger
 Clinicus

Loophulpmiddel (optioneel)
Alleen selecteren als het hulpmiddel dagelijks wordt gebruikt.
 Rollator/wandelrek (exclusief looptrainer).
 Krukken
 Wandelstok
 Maakt geen gebruik van een rollator/wandelrek, krukken of wandelstok

Handbewogen rolstoel (optioneel)
 Gebruikt een handbewogen rolstoel; beweegt deze niet zelf voort
 Gebruikt een handbewogen rolstoel; beweegt deze zelf voort
 Maakt geen gebruik van een handbewogen rolstoel


Elektrische rolstoel (optioneel)
 Gebruikt een elektrisch aangedreven rolstoel
 Maakt geen gebruik van een elektrisch aangedreven rolstoel

Is er sprake van een diagnose Autisme? (optioneel)
 Ja
 Nee

Boven

Afbeelding 10 Overige gegevens invullen


Kies tot slot voor 'Start Afname' om de afname te starten en vervolgens weer op 'Start' (afbeelding 11).

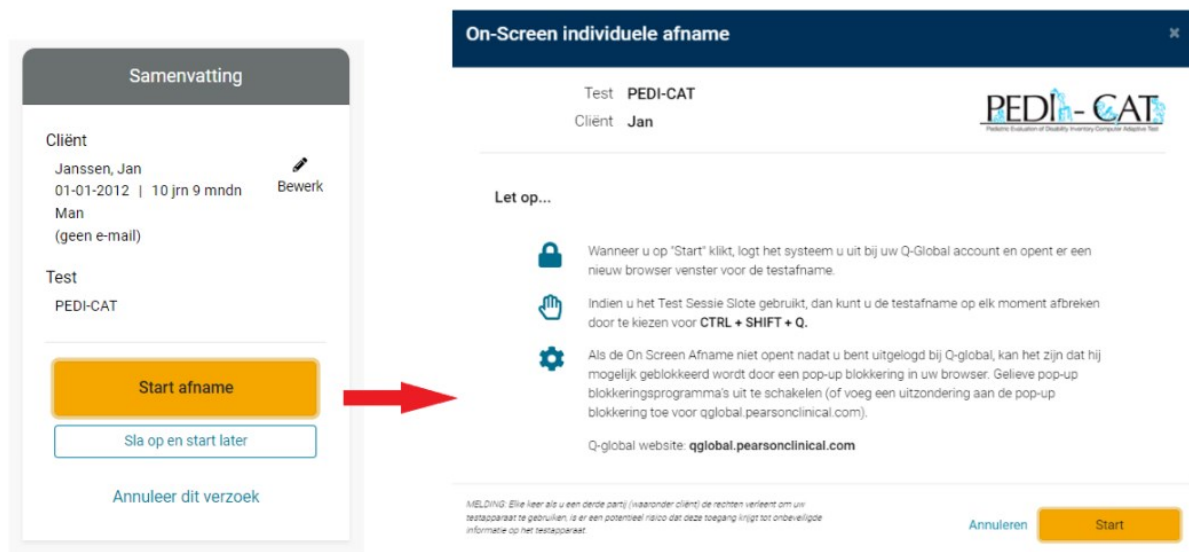

Afbeelding 11 Start afname

Stuur link via e-mail

Nadat u heeft gekozen voor 'Stuur link via e-mail', kunt u de afname verder klaarzetten. U vult onder Respondent de voor- en achternaam van de respondent in. Handig is om het vinkje voor 'Stuur e-mail notificatie als de afname is voltooid' aan te zetten. Geef in het tekstveld eronder uw e-mail (en/of e-mail van uw collega) op. U zult dan een e-mail notificatie ontvangen zodra de afname is voltooid (afbeelding 12).

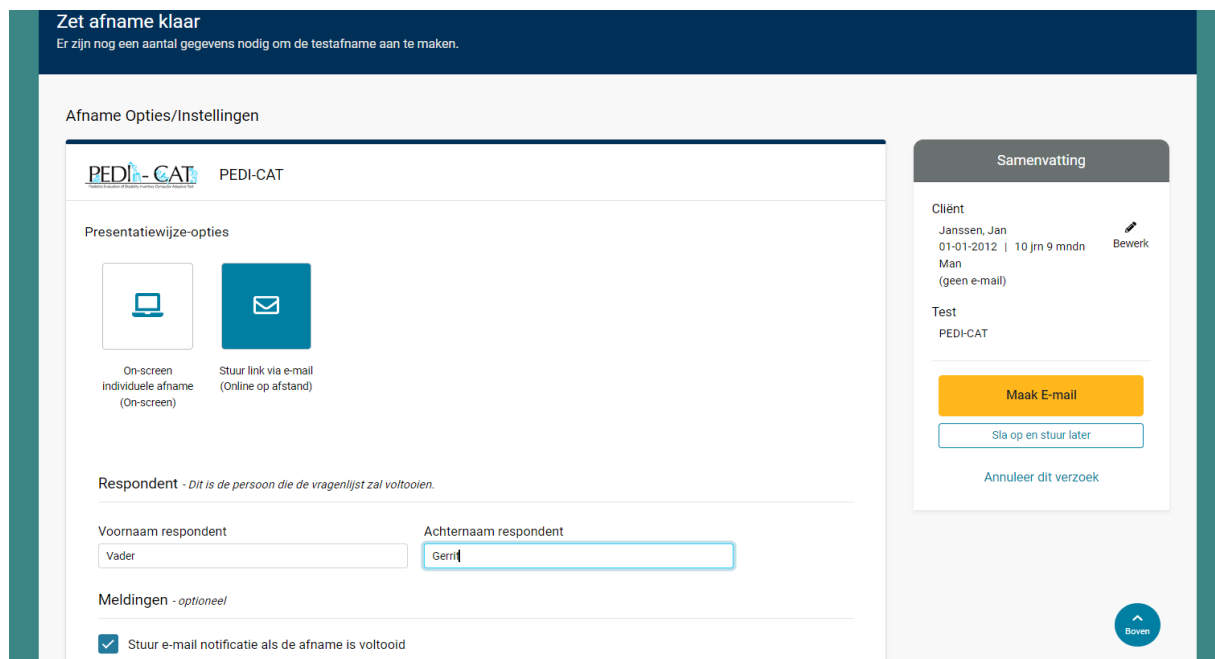

Afbeelding 12 Respondentgegevens invullen en e-mail notificatie

Kies onder Afnamegegevens welke domeinen u wenst af te nemen. Per domein kunt u kiezen uit een content-balanced versie en een Speedy-CAT versie (afbeelding 13).

Afnamegegevens

Domeinen
Selecteer ten minste één domein voor deze afname.

	Niet	Speedy	Content Balanced
Dagelijkse activiteiten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mobiliteit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sociaal/Cognitief	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verantwoordelijkheid	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Afbeelding 13 Domeinselectie

Daarna vult u de overige gegevens in. Alleen de informatie onder 'Loophulpmiddel' is optioneel, de rest is verplicht om in te vullen. Kies vervolgens voor 'Maak e-mail aan' (afbeelding 14).

Taal voor de afname
Nederlands

De persoon die dit invult: (optioneel)
 Ouder
 Andere verzorger
 Clinicus

Loophulpmiddel (optioneel)
Alleen selecteren als het hulpmiddel dagelijks wordt gebruikt.
 Rollator/wandelrek (exclusief looptrainer).
 Krukken
 Wandelstok
 Maakt geen gebruik van een rollator/wandelrek, krukken of wandelstok

Handbewogen rolstoel (optioneel)
 Gebruikt een handbewogen rolstoel; beweegt deze niet zelf voort
 Gebruikt een handbewogen rolstoel; beweegt deze zelf voort
 Maakt geen gebruik van een handbewogen rolstoel

Elektrische rolstoel (optioneel)
 Gebruikt een elektrisch aangedreven rolstoel
 Maakt geen gebruik van een elektrisch aangedreven rolstoel

Is er sprake van een diagnose Autisme? (optioneel)
 Ja
 Nee

Samenvatting

Client
 Janssen, Jan Bewerk
 01-01-2012 | 10 jrn 9 mndn
 Man
 (geen e-mail)

Test
 PEDI-CAT


Maak E-mail

Sla op en stuur later

Annuleer dit verzoek


Afbeelding 14 Overige gegevens invullen

Hierna kiest u voor het versturen van een link met uw eigen e-mailprogramma, of voor het versturen van een e-mail met link vanuit Q-global. Kiest u voor 'Verzenden met mijn eigen e-mailprogramma', dan krijgt u een link die gelijk naar het klembord wordt gekopieerd. Deze link kunt u vervolgens plakken in een eigen e-mailbericht in uw eigen e-mailprogramma (afbeelding 15).

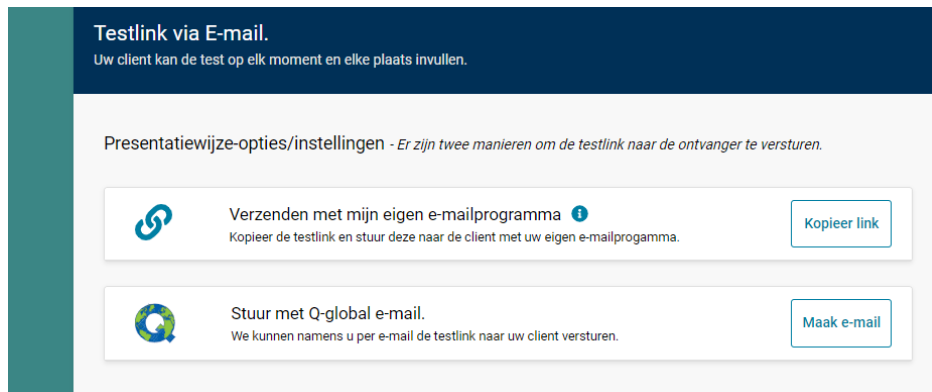

Afbeelding 15 Opties om testlink op te sturen

Kiest u voor 'Stuur met Q-global e-mail', vul dan eerst de ontbrekende gegevens van de respondent in. Vaak is het veld onder 'e-mailadres' nog leeg (afbeelding 16).

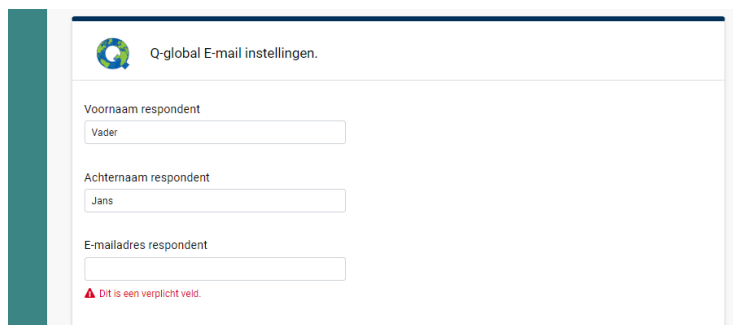The screenshot shows a form titled 'Q-global E-mail instellingen.' with three input fields: 'Voornaam respondent' containing 'Vader', 'Achternaam respondent' containing 'Jans', and 'E-mailadres respondent' which is empty. A red warning icon and text 'Dit is een verplicht veld.' are located below the email address field.

Afbeelding 16 E-mailinstellingen

Vervolgens kunt u het e-mailbericht verder samenstellen. Q-global genereert een automatische e-mail, maar deze kunt u ook nog aanpassen naar uw eigen smaak. Kies onder 'Instellingen voor aflevering van e-mail' eventueel om een kopie van de e-mail die naar de respondent wordt gestuurd te ontvangen (afbeelding 18).

Afbeelding 18 *E-mailbericht opstellen*

Kies tot slot voor 'Stuur e-mail' om de e-mail te versturen (afbeelding 19).

Afbeelding 19 *Stuur e-mail*

Rapport genereren

Wanneer de afname is voltooid krijgt de test op Q-global de status 'Gereed voor rapporteren'. U ziet dit op het startscherm van de cliënt. U selecteert de betreffende afname en klikt daarna op de knop 'Genereer Rapport' (afbeelding 20).

The screenshot shows a client dashboard with demographic information and a table of tests. The 'Genereer Rapport' button is highlighted in red.

Demografische kenmerken

Systeem-ID: 23043155
Account: Myrthe Wildenbeest
Voornaam: Jan
Aangepast veld 1:
Tweede naam:
Aangepast veld 2:
Achternaam: Janssen
Aangepast veld 3:
Geboortedatum: 01-01-2012
Aangepast veld 4:
Leeftijd: 10 jaar 10 maanden
Groepen:
Cliënt ID:
ID oude functie:
Geslacht: Man
E-mailadres:
Opmerking:

Buttons: Nieuwe test toewijzen, Test(s) verwijderen, **Genereer Rapport**

Reset Sorteervolgorde 1 Record

	<input type="checkbox"/>	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groeps tests
1	<input checked="" type="checkbox"/>	43422844	PEDI-CAT	27-10-2022	Online afname	Gereed voor rapporteren	

Afbeelding 20 Rapport genereren

Vervolgens komt u in het scherm 'Rapport selectie & configuratie' terecht. Selecteer hier het soort rapport dat u wilt genereren (meestal één optie). Daarna kunt u het rapport verder samenstellen en tot slot kiest u rechts in het scherm voor 'Genereer Rapport' (afbeelding 21).

The screenshot shows the 'Maak Rapport' screen with configuration options and a summary panel. The 'Genereer Rapport' button is highlighted in red.

Maak Rapport
We hebben nog een aantal gegevens nodig om dit rapport te genereren.

Rapport selectie & configuratie

PEDI-CAT Report
Voorraad nodig: 1
22 toepassingen beschikbaar

Configuraties

Rapport bestandstype
PDF - Dit rapport is alleen beschikbaar als PDF.

Rapportopties

- Voeg de naam van de cliënt toe
- Items afgenomen per domein
- Item kaarten

Instellingen

Taal van de rapportage
Nederlands

Samenvatting

Cliënt
Janssen, Jan
01-01-2012 | 10 jrn 10
mndn
Man
(geen e-mail)

Test
PEDI-CAT
Presentatiewijze: Online afname
27-10-2022

PEDI-CAT Report
Voor het gebruik van dit rapport wordt 1 toepassing in rekening gebracht.


Genereer Rapport

Hulp nodig Annuuleren Boven

Afbeelding 21 Rapport configuratie

Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt onder in uw taakbalk een pdf download van het rapport (Afbeelding 22). Als u hier op klikt, zal het rapport geopend worden.

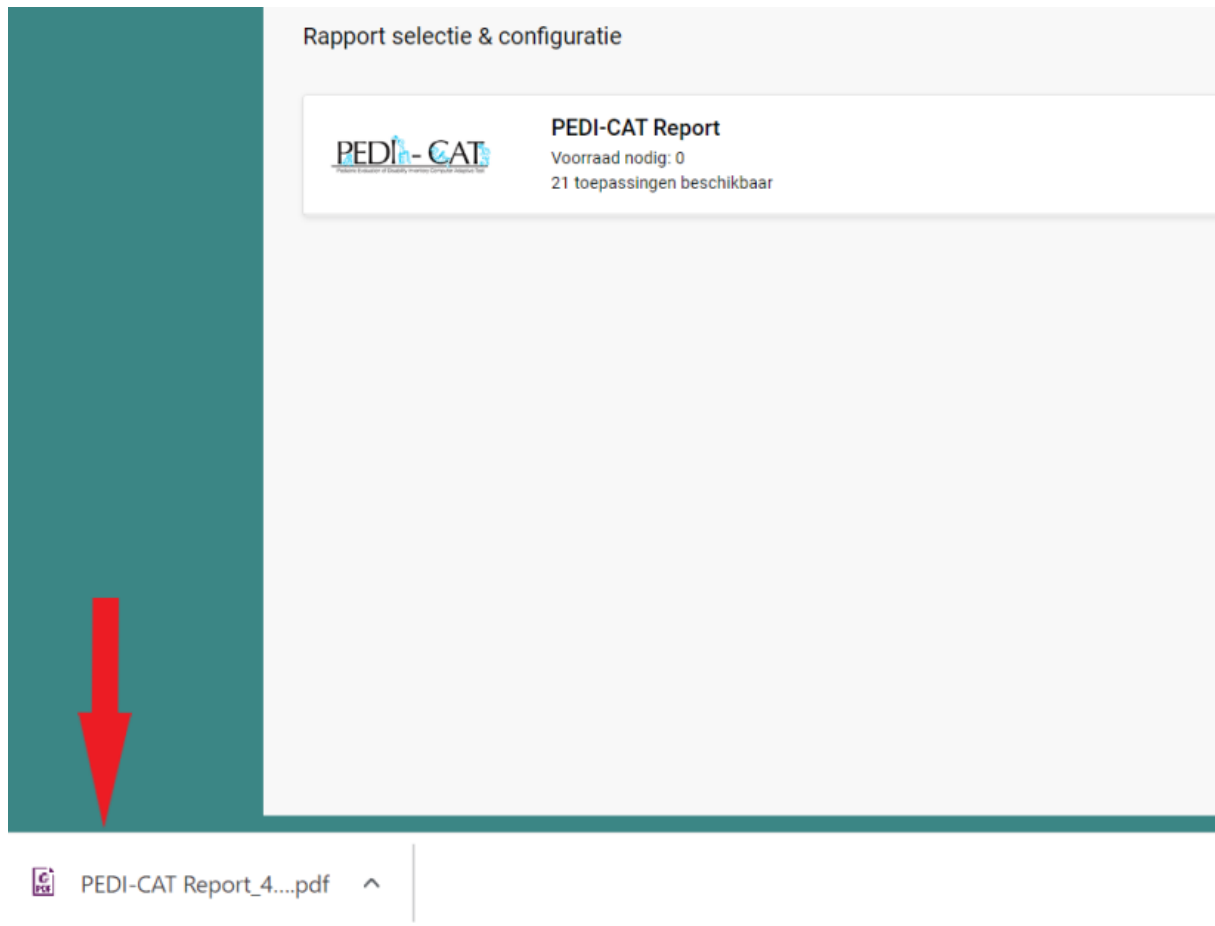

Afbeelding 22 *Rapport openen*

Een Multi-assessment rapport genereren

De PEDI-CAT kunt u inzetten om de voortgang of behandeluitkomst te evalueren. In dat geval zult u meerdere meetmomenten hebben. In Q-global is het mogelijk om de resultaten van meerdere meetmomenten in één rapport te krijgen (Multi-assessment rapport), zodat u deze gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Om een Multi-Assessment rapport te genereren, dient u eerst een rapport te genereren voor de losse afnames. Doe dit volgens de stappen beschreven in hoofdstuk 'Rapport genereren'. Daarna gaat u weer naar de startpagina van de cliënt, waar de betreffende afnames de status 'Rapport is gegenereerd' hebben gekregen. Hier selecteert u de afnames die u in één rapport zou willen hebben. Daarna klikt u op 'Genereer Rapport' (afbeelding 23).

Demografische kenmerken
 Systeem-ID: 23043155
 Voornaam: Jan
 Tweede naam:
 Achternaam: Janssen
 Geboortedatum: 01-01-2012
 Leeftijd: 10 jaar 10 maanden
 Cliënt ID:
 Geslacht: Man
 E-mailadres:
 Opmerking:

Account: Myrthe Wildenbeest
 Aangepast veld 1:
 Aangepast veld 2:
 Aangepast veld 3:
 Aangepast veld 4:
 Groepen:
 ID oude functie:

Nieuwe test toewijzen **Test(s) verwijderen** **Genereer Rapport**

Reset Sorteervolgorde 2 Records

	<input type="checkbox"/>	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groeps tests
1	<input checked="" type="checkbox"/>	43746785	PEDI-CAT	07-11-2022	On-screen afname	Rapport is gegenereerd	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	43422844	PEDI-CAT	27-10-2022	Online afname	Rapport is gegenereerd	

Afbeelding 23 Rapport selectie

Nadat u op 'Genereer Rapport' heeft geklikt, klikt u in het pop-up venster op 'PEDI-CAT Multiassessment Report' (afbeelding 24).

Rapporten voor PEDI-CAT

PEDI-CAT Multiassessment Report

Voor sommige rapporten is het vereist eerst een scorerapport te genereren. Als u een rapport ziet maar deze niet kunt selecteren, maak een scorerapport en probeer opnieuw.


Nieuwe test toewijzen **Test(s) verwijderen** **Genereer Rapport**

Reset Sorteervolgorde 2 Records

	<input type="checkbox"/>	Test ID	Test naam	Testdatum	Presentatiewijze	Status	Groeps tests
1	<input checked="" type="checkbox"/>	43746785	PEDI-CAT	07-11-2022	On-screen afname	Rapport is gegenereerd	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	43422844	PEDI-CAT	27-10-2022	Online afname	Rapport is gegenereerd	


Afbeelding 24 Multi-assessment rapport

Vervolgens komt u terecht in het Rapportselectie & configuratie scherm. Selecteer hier 'PEDI-CAT Multiassessment Report'. Daarna kunt u het rapport verder samenstellen. Klik tot slot op 'Genereer Rapport' (afbeelding 25).

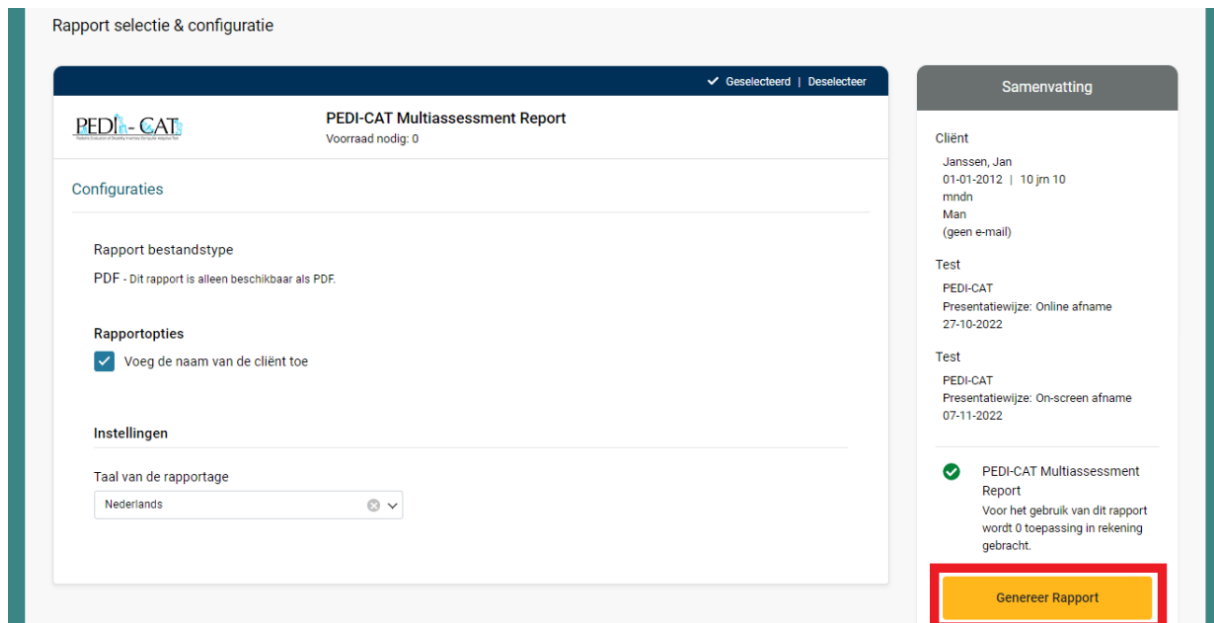

Afbeelding 25 Rapport configuratie en Genereer Rapport

Het rapport kunt u vervolgens openen via de taakbalk (afbeelding 26). Goed om te weten dat het genereren van een Multi-assessment rapport geen extra afname kost of overige kosten met zich meebrengt.

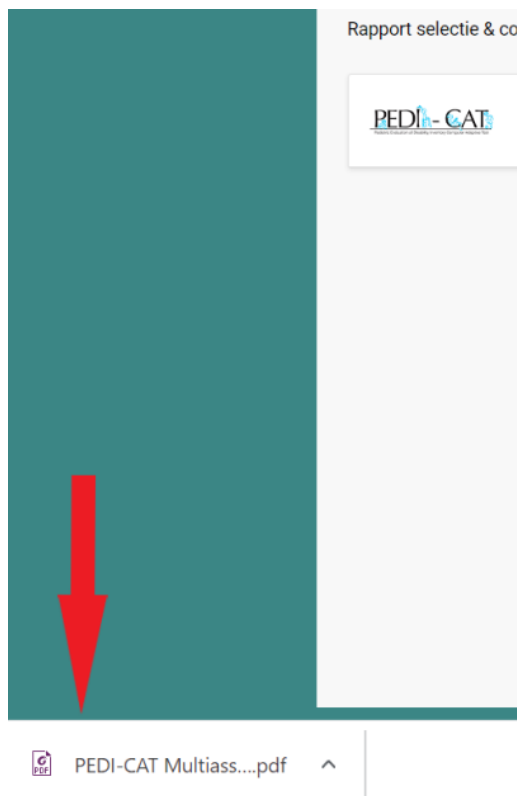

Afbeelding 26 Rapport openen