

FAQ's bij gebruik van de WAIS-IV-NL

Oktober 2025



Inhoudsopgave

Hoe vervang je een subtest op Q-interactive?	3
Waar vind je je resultaten na een digitale afname?	5
Resultaten op de iPad	5
Rapport genereren in de Central omgeving	6
• Rapport via 'Exporteer'	6
• Rapport via 'Exporteer als SLK file'	8
Resultatenpagina Central-omgeving	9
Wat te doen bij een missende score op Q-interactive?	10
Er is niet voldaan aan de omkeerregel	10
• Optie 1: Item terug wijzigen naar perfecte score	10
• Optie 2: Missende items vóór instapitem alsnog afnemen bij cliënt	11
• Optie 3: Items vóór instapitem goedkeuren zonder af te nemen	12
• Optie 4: Verdergaan zonder score	12
• Uitleg met video	12
Er is niet voldaan aan de omkeerregel	12
• Optie 1: Missende items alsnog afnemen totdat afbreekpunt is bereikt	13
• Optie 2: Items na laatst afgenomen item foutkeuren zonder af te nemen	13
• Optie 3: Scores terug wijzigen naar 0-scores	14
• Optie 4: Verdergaan zonder score	14
• Uitleg met video	14
De afgenomen subtest is niet genormeerd voor de leeftijd van de cliënt	15
Keuze 90% of 95% betrouwbaarheidsinterval	15
Mag je het TIQ interpreteren bij een disharmonisch profiel?	16
Meer informatie	16

Hoe vervang je een subtest op Q-interactive?

Wanneer de situatie er om vraagt, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen van de cliënt kun je ervoor kiezen om een kernsubtest te vervangen door een aanvullende subtest. Als een kernsubtest om enige reden ongeldig is geworden, kan vervanging eveneens noodzakelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat

een valide kernsubtest wordt vervangen door een aanvullende subtest alleen om een andere indexscore te krijgen. Er is slechts één vervanging voor iedere indexscore toegestaan. Er zijn niet meer dan twee vervangingen toegestaan bij het afleiden van het TIQ.

Bij de afname van de WAIS-IV-NL op Q-interactive worden vervangingen aangegeven op de iPad.

1. Ga naar de resultatenpagina van de betreffende afname op de iPad.

The screenshot shows the Q-interactive results page for client Andrea Stam. The page is divided into two main sections: 'Cliënt' (Client) and 'Batterij' (Battery). The 'Cliënt' section contains fields for ID, Name, Gender, Date of Birth, and Test Age. The 'Batterij' section contains a list of subtests, each with a status indicator (Afgerond - Completed). A red arrow points to the 'Onvolledige Tekeningen' (Incomplete Drawings) subtest, which is highlighted with a red circle and a document icon. The subtests listed are: Overeenkomsten, Matrix redeneren, Woordenschat, Rekenen, Figuur Samenstellen, Informatie, Onvolledige Tekeningen, and Gewichten.

Cliënt	
ID	514561
Naam	Andrea Test
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum:	07 dec. 1997
Testleeftijd	27 jaar, 9 maanden, 24 dagen

Afname	
Titel	WAIS-IV-NL
Duur	110 min
Status	Bezig
Startdatum	01 okt. 2025

Batterij	
Overeenkomsten WAIS-IV-NL	Afgerond
Matrix redeneren WAIS-IV-NL	Afgerond
Woordenschat WAIS-IV-NL	Afgerond
Rekenen WAIS-IV-NL	Afgerond
Figuur Samenstellen WAIS-IV-NL	Afgerond
Informatie WAIS-IV-NL	Afgerond
Onvolledige Tekeningen WAIS-IV-NL	Afgerond
Gewichten WAIS-IV-NL	Afgerond

2. Ga naar het tabblad Indexen en klik op het tandwielletje naast de score.

Terug Resultaten: Voorbeeld WAIS-IV To do

Subtests Indexen

WAIS-IV-NL

		Indexscore
> Verbaal Begrip Index (VBI)	⚙️	91
> Perceptueel Redeneren Index (PRI)	⚙️	91
> Werkgeheugen Index (Wgl)	⚙️	89
> Verwerkingssnelheid Index (Vsl)	⚙️	76
> Totaal IQ (TIQ)		83

3. In het pop-up venster wat vervolgens opent kun je vervangingen aangeven. Deselecteer de kernsubtest die je wil vervangen en selecteer onder Aanvullende subtests de vervangende subtest.

Subtests Indexen

WAIS-IV-NL

Verbaal Begrip Index
Perceptueel Redeneren
Werkgeheugen Index
Verwerkingssnelheid
Totaal IQ (TIQ)

WMS-IV-NL Vol

Er is geen informatie over

Vervanging en schatting

Deze score is gebaseerd op de kernsubtests.

Vervanging van subtests Eén enkele kernsubtest mag worden vervangen door een aanvullende subtest.
Schatting: Bij een index met drie kernsubtests mag er één subtest geschat worden. Bij het TIQ mogen er twee subtests geschat worden.

Kernsubtests

Cijferreeksen ☐
Rekenen ☒

Aanvullende subtests

Cijfers en Letters Nazeggen ☒

⚠️ Deze score is verkregen door middel van vervanging.

Annuleren Opslaan

Waar vind je je resultaten na een digitale afname?

Nadat een afname is voltooid, kun je je resultaten op verschillende manieren terugvinden en bekijken.

Resultaten op de iPad

Allereerst kun je je resultaten direct bekijken op de resultatenpagina op de iPad.

Verwijder

Bewerk

To do

Hervat

Cliënt

ID	514561
Naam	Andrea Test
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum:	07 dec. 1997
Testleeftijd	27 jaar, 9 maanden, 24 dagen

Afname

Titel	WAIS-IV-NL
Duur	110 min
Status	Bezig
Startdatum	01 okt. 2025

Batterij

Overeenkomsten
WAIS-IV-NL

Afgerond

Matrix redeneren
WAIS-IV-NL

Afgerond

Woordenschat
WAIS-IV-NL

Afgerond

Rekenen
WAIS-IV-NL

Afgerond

Figuur Samenstellen
WAIS-IV-NL

Afgerond

Informatie
WAIS-IV-NL

Afgerond

Onvolledige Tekeningen
WAIS-IV-NL

Afgerond

Gewichten

Afgerond


Subtests		Indexen	
WAIS-IV-NL		Normscore	
➤	Blokpatronen	7	
➤	Overeenkomsten	10	
➤	Cijferreeksen	12	
➤	Matrix redeneren	9	
➤	Woordenschat	8	
➤	Rekenen	4	
➤	Symbool Zoeken	4	
➤	Figuur Samenstellen	10	
➤	Informatie	7	
➤	Symbool Substitutie Coderen	7	
➤	Cijfers en Letters Nazeggen	-	

Rapport genereren in de Central omgeving

Het is ook mogelijk om de resultaten te downloaden in een rapport.
Voor de WAIS-IV-NL zijn er twee soorten Excel-rapporten beschikbaar.

- Rapport via 'Exporteer'

Met de knop 'Exporteer' krijg je een uitgebreid .csv (comma separated values) rapport zonder opmaak. Dit rapport bevat de meeste informatie: subtest ruwe scores, geschaalde scores, paarsgewijze verschilvergelijkingen en de index-scores met bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen.

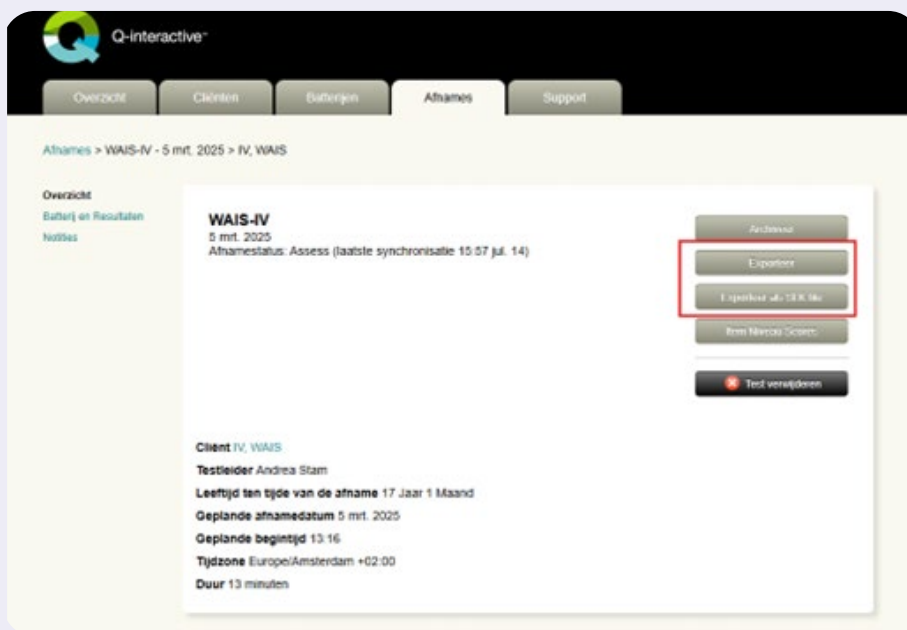

Je kunt dit rapport als volgt opmaken om het beter leesbaar te maken:

1. Open het .csv bestand en selecteer kolom 1.


The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	RUWE SCORES																				
7	Subtest_Ruwe score																				
8	WAIS-IV-NL Blokpatronen_24																				
9	WAIS-IV-NL Overeenkomsten_12																				
10	WAIS-IV-NL Cijferreeksen_12																				
11	WAIS-IV-NL Matrix redeneren_12																				
12	WAIS-IV-NL Woordenschat_14																				
13	WAIS-IV-NL Rekenen_11																				
14	WAIS-IV-NL Symbool Zoeken_28																				
15	WAIS-IV-NL Figuur Samenstellen_9																				
16	WAIS-IV-NL Informatie_6																				
17	WAIS-IV-NL Symbool Substitutie Coderen_100																				
18	WAIS-IV-NL Cijfers en Letters Nazeggen_5																				
19	WAIS-IV-NL Gewichten_13																				
20	WAIS-IV-NL Begrijpen_14																				
21	WAIS-IV-NL Figuur Zoeken_28																				
22	WAIS-IV-NL Onvolledige Tekeningen_...																				
23	WMS-IV-NL Volwassenen Patronen L...																				
24	WMS-IV-NL Volwassenen Symbool Rekenen_22																				
25	WMS-IV-NL Volwassenen Logisch Geheugen L_15																				
26	WAIS-IV-NL Symbool Zoeken_23																				
27	WAIS-IV-NL Symbool Substitutie Coderen_48																				
28	WAIS-IV-NL Blokpatronen_...																				
29	WAIS-IV-NL Overeenkomsten_10																				
30	WAIS-IV-NL Rekenen_...																				
31	WAIS-IV-NL Symbool Substitutie Coderen_50																				
32	WAIS-IV-NL Cijfers en Letters Nazeggen_3																				
33	WAIS-IV-NL Gewichten_...																				
34	WAIS-IV-NL Woordenschat_...																				


2. Klik vervolgens in het menu op Gegevens en dan in het lint op 'Tekst naar kolommen'.



3. Kies in het venster 'Tekst naar kolommen - stap 1 van 3' voor 'Gescheiden' en klik op Volgende

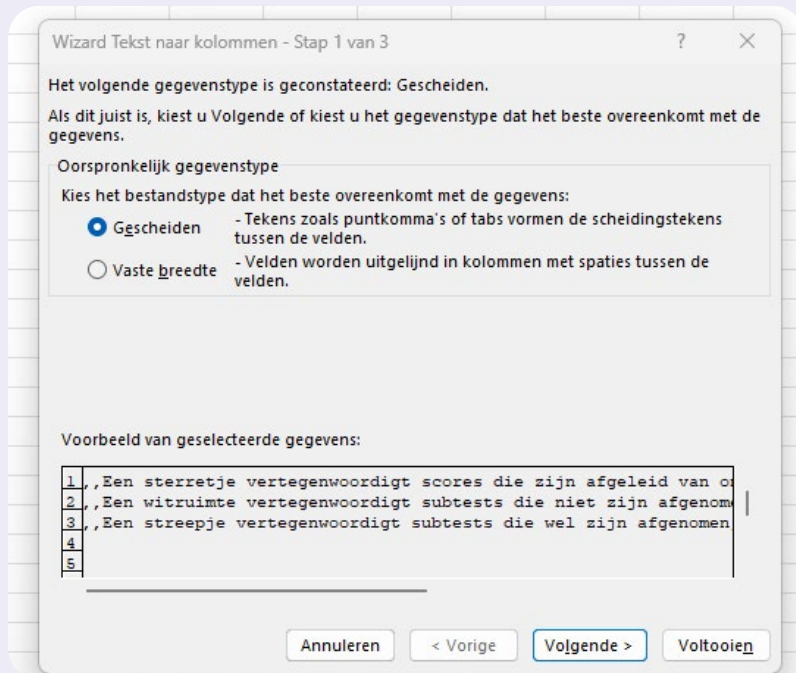

4. Selecteer vervolgens onder Scheidingstekens 'Komma' en deselecteer 'Tab'. Klik daarna op Volgende.

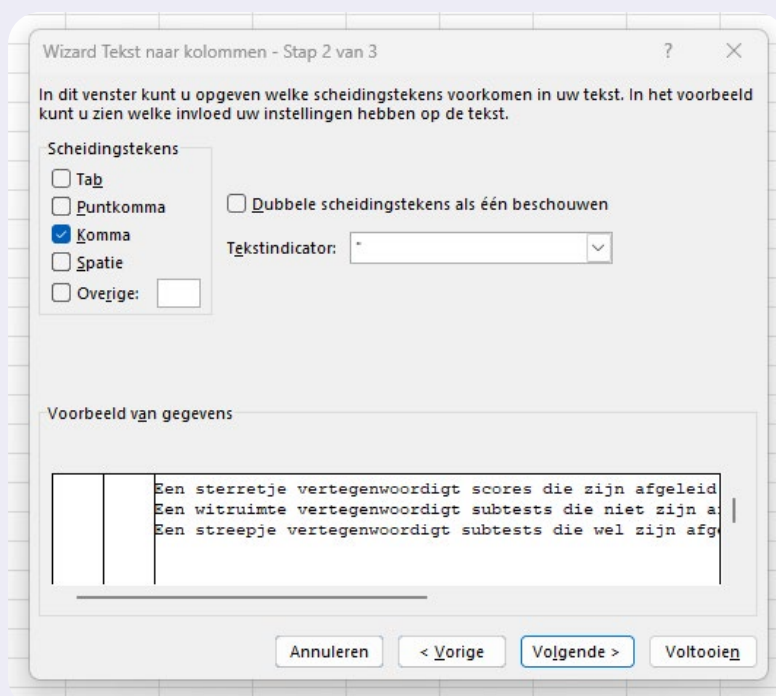

5. Klik in het laatste venster op Voltooien.

Wizard Tekst naar kolommen - Stap 3 van 3

In dit venster kunt u voor elke kolom het gegevenstype instellen.

Gegevenstype per kolom

☒ Standaard

☐ Tekst

☐ Datum: DMJ

☐ Kolom overslaan bij importeren

De optie Standaard converteert numerieke waarden naar getallen, datumwaarden naar datums en alle overige waarden naar tekst.

Geavanceerd...

Bestemming: R1K1

Voorbeeld van gegevens

Stand	Stand	Standaard
Een sterretje	vertegenwoordigt	scores die zijn afgeleid
Een witruimte	vertegenwoordigt	subtests die niet zijn a
Een streepje	vertegenwoordigt	subtests die wel zijn afg

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien

6. Alle gegevens worden nu in een eigen kolom geplaatst.
Je kan de breedte van de kolom aanpassen om het rapport nog beter leesbaar te maken.

• Rapport via 'Exporteer als SLK file'

Via de knop 'Exporteer als SLK file' krijg je een compact en opgemaakt Excel-rapport. Hierin staan alleen de indexscores met bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen en de ruwe scores en bijbehorende geschaalde scores per subtest.

Q-interactive

Overzicht Batterij en Resultaten Notities


WAIS-IV
5 mrt. 2025
Afhamestatus: Assess (laatste synchronisatie 10:57 jul. 14)

Afdrukken
Exporteer
Exporteer als SLK file
Item Nivoo's Scoren
Test verspreiden


Client IV, WAIS
Testleider: Andrea Stam
Leeftijd ten tijde van de afname: 17 Jaar 1 Maand
Geplande afnamedatum: 5 mrt. 2025
Geplande begintijd: 13:16
Tijdzone: Europe/Amsterdam +02:00
Duur: 13 minuten

Resultatenpagina Central-omgeving

Alle resultaten worden ook overzichtelijk weergegeven in de Central omgeving van Q-interactive. Ga naar de afname en klik in het menu aan de linkerkant op Batterij en Resultaten.

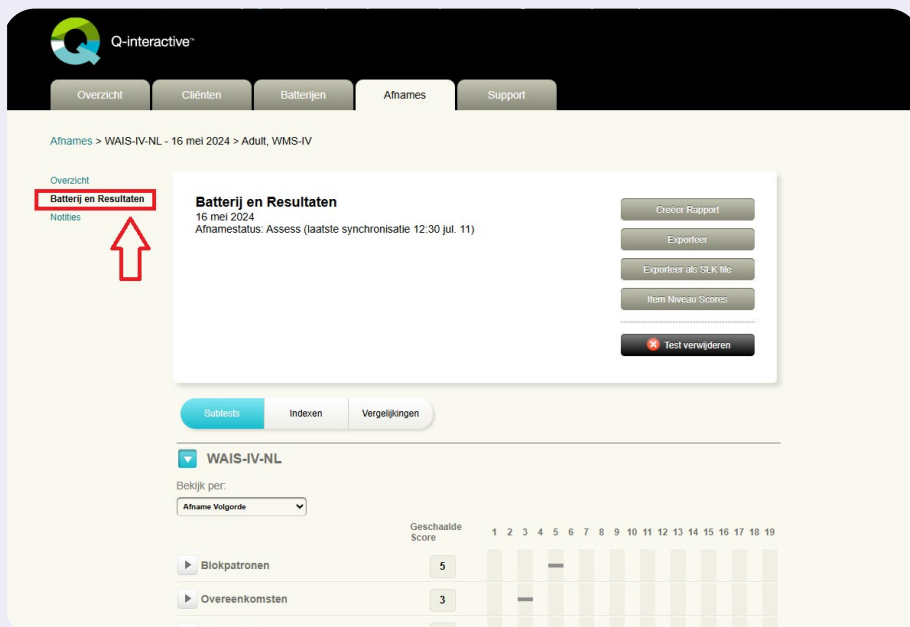

Onder de tab Subtests vind je alle scores op subtestniveau. Onder de tab Indexen vind je alle resultaten op indexniveau. Onder de tab Vergelijkingen vind je de paarsgewijze verschilvergelijkingen en de sterkte-zwakteanalyse.

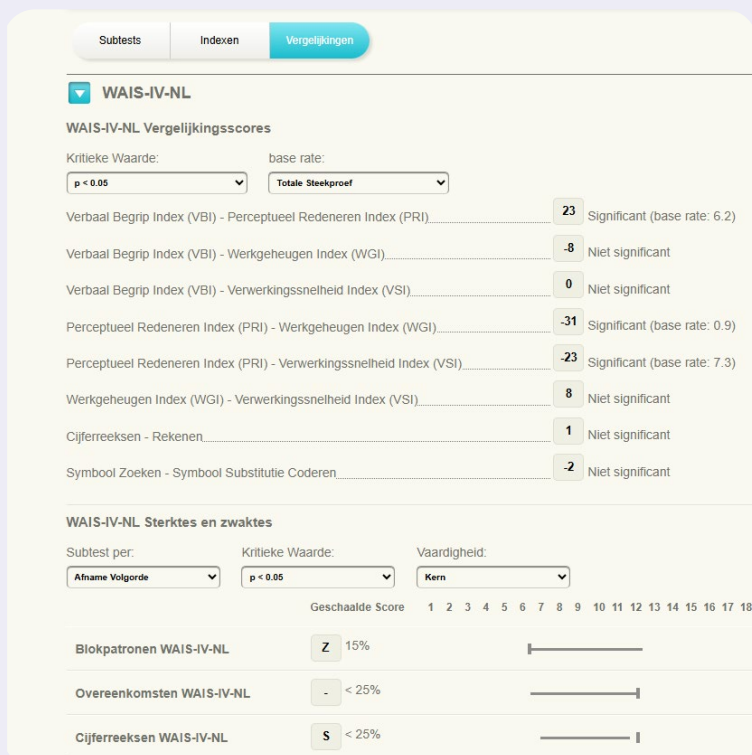

Wat te doen bij een missende score op Q-interactive?

Er zijn meerdere verklaringen voor een missende geschaalde score op een van de subtests.

Er is niet voldaan aan de omkeerregel

De reden dat er geen geschaalde score wordt berekend is omdat er niet aan de omkeerregel is voldaan. De omkeerregel houdt in dat er een perfecte score behaald moet worden op de eerste twee items die je afneemt. Als dat niet het geval is, had er omgekeerd moeten worden en in omgekeerde volgorde verder getest moeten worden totdat er twee opeenvolgende perfecte scores zijn behaald. Daarna kun je weer verder testen.

Je kunt controleren of er iets is misgegaan met de omkeerregel door te controleren welke scores er zijn behaald op het item waarop je bent ingestapt en het item daarna. Als er op die 2 items geen perfecte scores zijn behaald (perfecte score = maximale score), dan is er niet aan de omkeerregel voldaan. Om toch een geschaalde score te krijgen, kun je de volgende dingen doen:

• Optie 1: Item terug wijzigen naar perfecte score

In de meeste gevallen is er niet aan de omkeerregel voldaan, omdat na de afname het instapitem of het item erna is gewijzigd van een perfecte score naar een niet-perfecte score. In dat geval is het een optie om het item terug te wijzigen naar een perfecte score, zodat er weer aan de omkeerregel is voldaan. **Je kunt het item als volgt wijzigen:**

1. Selecteer de betreffende afname in het beginscherm nadat je bent ingelogd.
2. Klik op de groene knop Hervat. Je komt dan weer terug in de testafname.
3. Ga via het menu rechts onderin naar het Testoverzicht (dat is de knop naast het huisje)
4. Scrol in het Testoverzicht naar de subtest en ga naar het eerste item vanaf het instap-punt. Dit item wordt aangegeven met een pijltje.
5. Geef dit item een perfecte score. Klik onderin op Volgende en geef het item erna ook een perfecte score. Klik vervolgens op Gereed rechtsboven in de hoek.
6. Ga weer terug naar het startscherm door op het huisje in het menu onderin te klikken. Ga vervolgens naar het beginscherm door op Terug linksboven in de hoek te klikken.
7. Synchroniseer de resultaten met Central (**let op!** De iPad dient verbonden te zijn met Wifi).

Let op: deze methode verlaagt de betrouwbaarheid van de resultaten, omdat je een score geeft die eigenlijk niet terecht was. Als je voor deze optie kiest, dien je de resultaten op de subtest met voorzichtigheid te interpreteren.

• Optie 2: Missende items vóór instapitem alsnog afnemen bij cliënt

Je kan de items vóór het instapitem alsnog bij de cliënt afnemen in omgekeerde volgorde, mits dat mogelijk is. In dat geval dien je de subtest opnieuw toe te voegen aan de bestaande afname. Vul dan eerst de scores op de eerste twee items in. Je zult dan automatisch een melding krijgen dat je om moet

keren. Test dan in omgekeerde volgorde verder totdat er twee opeenvolgende perfecte scores zijn behaald. Het systeem houdt dit voor je bij en stuurt je automatisch terug naar waar je gebleven was. Vanaf daar kun je de eerder behaalde scores invullen.

Het opnieuw toevoegen van een subtest aan de batterij werkt als volgt:

1. Selecteer de betreffende afname in het beginscherm nadat je bent ingelogd.
2. Klik op de roze knop Bewerk. Er opent zich links in het scherm een testbibliotheek.
3. Klik op het pijltje achter de WAIS-IV om het drop-down menu te openen.
4. Selecteer de betreffende subtest. De subtest verschijnt nu onderaan in de batterij.
5. Sla de batterij op (rechtsboven). Je komt nu weer op het startscherm van deze afname.
6. Klik vervolgens op de groene knop Hervat. Je komt nu weer terug in de testafname.
7. Swipe naar rechts om de nieuw toegevoegde subtest te starten en scoor eerst de eerste twee items met de eerder behaalde scores van de cliënt. Je krijgt daarna een melding dat je om moet keren omdat er geen perfecte scores zijn behaald op de eerste twee items.
8. Keer om en neem de items in omgekeerde volgorde af bij de cliënt totdat er twee opeenvolgende perfecte scores zijn behaald. Wanneer dat het geval is, word je automatisch teruggestuurd naar het laatst afgenomen item. Vul de eerder behaalde scores in totdat er aan de afbreekregel is voldaan of totdat je bij de Subtest samenvattingspagina komt.
9. Ga weer terug naar het startscherm door op het huisje in het menu onderin te klikken. Ga vervolgens naar het beginscherm door op Terug linksboven in de hoek te klikken.
10. Synchroniseer de resultaten met Central (**let op!** De iPad dient verbonden te zijn met Wifi).

Let op: deze optie verlaagt de betrouwbaarheid van de resultaten omdat je de subtest in twee sessies hebt afgenomen en dat is niet in lijn met de instructies. Je dient de resultaten op deze subtest met voorzichtigheid te interpreteren.

• Optie 3: Items vóór instapitem goedkeuren zonder af te nemen

Als het niet mogelijk is om de extra items vóór het instapitem af te nemen bij de cliënt, kun je er ook voor kiezen om deze items een perfecte score te geven. Je gaat er dan vanuit dat de cliënt deze items goed zou hebben beantwoord. Ook bij deze optie moet je de subtest opnieuw toevoegen aan de testbatterij. Volg

hiervoor de stappen zoals hierboven beschreven. Bij stap 8 geef je alle items die je af moet nemen een perfecte score totdat er aan de omkeerregel is voldaan. Je keert dan weer terug naar het laatst afgenomen item. Vanaf daar kun je alle eerder behaalde scores invullen.

Let op: ook deze optie verlaagt de betrouwbaarheid van de resultaten omdat je scores toekent die in werkelijkheid niet zijn behaald. Je dient de resultaten op deze subtest met voorzichtigheid te interpreteren.

• Optie 4: Verdergaan zonder score

Je kunt er ook voor kiezen de subtest te laten voor wat het is, dus zonder score. Als er een score ontbreekt op een kernsubtest kun je de subtest vervangen door een aanvullende subtest (mits je deze hebt afgenomen). Je kan

dan het TIQ en de indexscore berekenen. Als er een score ontbreekt op een aanvullende subtest, blijft het mogelijk het TIQ en de indexen te berekenen, ook zonder score op de aanvullende subtest.

• Uitleg met video

Een missende score als gevolg van het niet voldoen aan de omkeerregel en de stappen om het op te lossen worden ook getoond in [deze video](#) vanaf minuut 06:55 tot minuut 10:10.

Er is niet voldaan aan de afbreekregel

De reden dat er geen geschaalde score wordt berekend is omdat er niet (juist) aan de afbreekregel is voldaan. De afbreekregel houdt in dat er een x aantal achtereenvolgende 0-scores behaald moet worden, voordat er mag worden afgebroken. Als er te weinig achtereenvolgende 0-scores behaald zijn, wordt er geen score berekend.

Het is helaas niet mogelijk om in de bestaande subtest verder te testen om alsnog aan de afbreekregel te voldoen. Een eenmaal afgeronde subtest wordt namelijk vergrendeld. Om toch een geschaalde score te krijgen, kun je de volgende dingen doen:

• Optie 1: Missende items alsnog afnemen totdat afbreekpunt is bereikt

Als je hiervoor kiest, dien je de subtest opnieuw toe te voegen aan de testbatterij. Je vult eerst de eerder behaalde scores in en test dan verder vanaf het laatst afgenomen item, totdat er aan de afbreekregel is voldaan.

Het opnieuw toevoegen van een subtest aan de bestaande batterij werkt als volgt:

1. Selecteer de betreffende afname in het beginscherm nadat je bent ingelogd.
2. Klik op de roze knop Bewerk. Er opent zich links in het scherm een testbibliotheek.
3. Klik op het pijltje achter de WAIS-IV om het drop-down menu te openen.
4. Selecteer de betreffende subtest. De subtest verschijnt nu onderaan in de batterij.
5. Sla de batterij op (rechtsboven). Je komt nu weer op het startscherm van deze afname.
6. Klik vervolgens op de groene knop Hervat. Je komt nu weer terug in de testafname.
7. Swipe naar rechts om de nieuw toegevoegde subtest te starten en scoor de subtest met de eerder behaalde scores van de cliënt.
8. Neem daarna de volgende items af bij de cliënt totdat er aan de afbreekregel is voldaan of totdat je bij de Subtest samenvattingspagina komt.
9. Ga weer terug naar het startscherm door op het huisje in het menu onderin te klikken. Ga vervolgens naar het beginscherm door op Terug linksboven in de hoek te klikken.
10. Synchroniseer de resultaten met Central (**let op!** De iPad dient verbonden te zijn met Wifi).

Let op: deze optie verlaagt de betrouwbaarheid van de resultaten omdat je de subtest in twee sessies hebt afgenomen en dat is niet in lijn met de instructies. Je dient de resultaten op deze subtest met voorzichtigheid te interpreteren.

• Optie 2: Items na laatst afgenomen item foutkeuren zonder af te nemen

Als het niet mogelijk is om extra items af te nemen bij de cliënt, kun je er ook voor kiezen de subtest opnieuw toe te voegen en vanaf het laatst afgenomen item extra items af te nemen en deze direct met 0 te scoren totdat er aan de afbreekregel is voldaan. Je gaat er dan vanuit dat de cliënt deze items fout beantwoord zou hebben.

Ook bij deze optie moet je de subtest opnieuw toevoegen aan de testbatterij. Volg hiervoor de stappen zoals hierboven beschreven. Bij stap 8 neem je de items niet opnieuw af, maar scoor je de items met 0 punten totdat er aan de afbreekregel is voldaan.

Let op: Omdat je scores toekent die in werkelijkheid niet zijn behaald, resulteert ook deze optie in een score met een verminderde betrouwbaarheid. Interpreteer de resultaten met voorzichtigheid.

• Optie 3: Scores terug wijzigen naar 0-scores

Het kan voorkomen dat er niet meer aan de afbreekregel is voldaan omdat er scores na de afname zijn gewijzigd, waardoor er geen x aantal opeenvolgende 0-scores meer zijn. In dat geval kun je er ook voor kiezen om deze items weer terug te zetten naar 0

punten. Je kunt dan eventueel ergens anders een 1-punts antwoord wijzigen naar 2 punten (als dat mogelijk is), zodat de ruwe score gelijk blijft. Als je hiervoor kiest, dien je de scores op de laatste items aan te passen in de bestaande subtest.

Het aanpassen van de scores doe je als volgt:

1. Selecteer de betreffende afname in het beginscherm nadat je bent ingelogd.
2. Klik op de groene knop Hervat. Je komt dan weer terug in de testafname.
3. Ga via het menu rechts onderin naar het Testoverzicht (dat is de knop naast het huisje).
4. Scrol in het Testoverzicht naar de subtest en klik op het item dat je aan wil passen.
5. Zet het item of de items terug naar 0 punten en zorg dat er voldoende achtereenvolgende items met 0 punten zijn gescoord, zodat je voldoet aan de afbreekregel. Je kunt doorgaan naar het volgende item door onderin op Volgende te klikken.
6. Klik vervolgens op Gereed rechtsboven in de hoek. Je komt nu weer bij de Subtest samenvattingspagina terecht.
7. Ga weer terug naar het startscherm door op het huisje in het menu onderin te klikken. Ga vervolgens naar het beginscherm door op Terug linksboven in de hoek te klikken.
8. Synchroniseer de resultaten met Central (**let op!** De iPad dient verbonden te zijn met Wifi).

Let op: deze methode verlaagt de betrouwbaarheid van de resultaten, omdat je een score geeft die eigenlijk niet terecht was. Als je voor deze optie kiest, dien je de resultaten op de subtest met voorzichtigheid te interpreteren.

• Optie 4: Verdergaan zonder score

Je kunt er ook voor kiezen de subtest te laten voor wat het is, dus zonder score. Als er een score ontbreekt op een kernsubtest kun je de subtest vervangen door een aanvullende subtest (mits je deze hebt afgenomen). Je kunt dan het TIQ en de indexscore berekenen. Als er een score ontbreekt op een aanvullende subtest, blijft het mogelijk het TIQ en de indexen te berekenen, ook zonder score op de aanvullende subtest.

• Uitleg met video

Een missende score als gevolg van het niet voldoen aan de afbreekregel en de stappen om het op te lossen worden ook uitgelegd in [deze video](#) vanaf minuut 01:34 tot minuut 06:46.

De afgenomen subtest is niet genormeerd voor de leeftijd van de cliënt

De subtests Cijfers en Letters Nazeggen, Gewichten en Figuur Zoeken zijn niet genormeerd voor ouderen vanaf 70 jaar. Als je deze subtests afneemt bij cliënten van deze leeftijd, zal er geen score berekend worden.

Keuze 90% of 95% betrouwbaarheidsinterval

De keuze tussen het 90% of 95% betrouwbaarheidsinterval is niet inherent aan de test en is aan de clinicus zelf. Er wordt in de handleidingen dan ook geen concreet advies gegeven over welk interval je dient te gebruiken.

Een betrouwbaarheidsinterval van 95% geeft meer zekerheid. Het 90% betrouwbaarheidsinterval is smaller en

daardoor soms veelzeggender. Als een 95% betrouwbaarheidsinterval de classificaties laaggemiddeld tot hooggemiddeld beslaat, is het de vraag hoe relevant dit is. Het 90% betrouwbaarheidsinterval geeft een smaller interval, waarmee de diagnosticus wellicht meer kan. De ene is niet beter dan de ander. Toch wordt het 90% betrouwbaarheidsinterval de laatste tijd vaker gebruikt in de praktijk.

Let op: ook al geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval meer zekerheid, beide intervallen zijn gebaseerd op dezelfde standaard meetfout en alleen toepasbaar op valide afnames. Is je afname niet valide doordat je bent afgeweken van de instructies in de handleiding? Noteer dit dan in je verslaglegging en interpreteer de resultaten met voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het betrouwbaarheidsinterval: ook deze dien je met voorzichtigheid te interpreteren, ongeacht of je het 90% of 95% betrouwbaarheidsinterval hebt gekozen.



Mag je het TIQ interpreteren bij een disharmonisch profiel?

Het TIQ is altijd te interpreteren en rapporteren, ook als er sprake is van discrepanties in het profiel. Er is sprake van discrepantie als er significante verschillen bestaan tussen twee of meer indexen, ongeacht welke. Het TIQ is de meest betrouwbare score en uit onderzoek blijkt dat er geen bewijs bestaat dat het TIQ ongeldig, onbetrouwbaar of oninterpreteerbaar wordt als het verschil tussen indexen boven een bepaalde waarde uitkomt. Het TIQ behoudt dezelfde constructvaliditeit en predictieve validiteit. Wel is het TIQ een minder goede samenvatting van de intellectuele vaardigheden als er sprake is van onderliggende significante verschillen. Het TIQ alleen is dan onvoldoende om de intellectuele vaardigheden mee te beschrijven. Dit maakt het TIQ echter niet ongeldig. In

dit geval is het belangrijk dan ook te kijken naar de onderliggende vaardigheden. Dit kun je doen met de discrepantieanalyse en de sterkte-zwakteanalyse. Daarnaast kun je aanvullende assessments doen om de behoeften van je cliënt volledig te kunnen begrijpen.

Naast het bekijken van de statistische significantie is het ook belangrijk te kijken naar de base rate. De base rate geeft aan hoe vaak het verschil voorkomt in de normeringssteekproef en dus of een statistisch significant verschil ook klinisch betekenisvol is. Verschillen tussen scores die voorkomen bij minder dan 15% van de normgroep moeten als ongebruikelijk worden gezien.

Meer informatie

Op de [Q-interactive supportpagina](#) zijn meer handleidingen en video's te vinden waarin het antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen of waarin wordt getoond hoe veel voorkomende problemen bij een digitale afname opgelost kunnen worden.