



## Tips & Tricks

Tips & Tricks: voor, tijdens en na de testafname  
**juni 2020**



Copyright © 2020. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden.  
Q-interactive is een handelsmerk in de VS en/of andere landen van Pearson Education, Inc. of haar filialen.

## Inhoud

<a href="#"><u>Breek een subtest niet te vroeg af</u></a>	3
<a href="#"><u>Gebruik de knop 'Bewerk Batterij'</u></a>	3
<a href="#"><u>Scores aanpassen na een testafname</u></a>	3
<a href="#"><u>Leeftijd van de cliënt aanpassen</u></a>	3
<a href="#"><u>Houd alles up-to-date</u></a>	4
<a href="#"><u>iPad's delen</u></a>	4
<a href="#"><u>Afnames verwijderen</u></a>	4

## Breek een subtest niet te vroeg af

Bij subtests waar de cliënt een verbale respons geeft worden er audio-opnames gemaakt. Door deze audio-opnames kan het voorkomen dat je achteraf een score wilt aanpassen. Echter wanneer je achteraf een 0-score van één van de afbreekitems toch een punt geeft dan is er geen afbreekpunt meer en kan er geen subtestscore bepaald worden. Je hebt dan eigenlijk te weinig items afgenomen. De tip is dan ook om altijd voldoende items af te nemen. Bij de minste twijfel over of het afbreekpunt wel echt is bereikt kun je het beste kiezen voor **Test Limieten** in plaats van afbreken. Breek vervolgens pas handmatig af als je er echt 100% zeker van bent dat het afbreekpunt bereikt is. Als je dan achteraf scores gaat aanpassen dan heeft het afbreekpunt ruimte om zich te verplaatsen.

## Gebruik de knop 'Bewerk Batterij'

Als er tijdens de afname van een subtest iets is misgegaan en je wilt deze opnieuw afnemen bij de cliënt dan kun je de subtest nogmaals toevoegen aan de testafname via **Bewerk Batterij** op het tabblad *Batterij* in het beginscherm van de app op je testleider-iPad. Het systeem neemt automatisch deze tweede versie van de subtest mee in alle scoreberekeningen. Maak in dit soort gevallen dus geen nieuwe testafname aan maar voeg de subtest toe aan de afname via **Bewerk Batterij**. Ook als je bepaalde onderdelen toch niet wilt afnemen dan kun je via de **Bewerk Batterij**-knop subtests verwijderen uit de afname. Als je nog niet voorbij het startscherm van een subtest bent dan kun je de betreffende subtest nog verwijderen via **Bewerk Batterij** en betaal je er ook niet voor.

## Scores aanpassen na een testafname

Je kunt achteraf scores aanpassen van alle items die je hebt afgenomen, dus niet alleen van de items die op je *to-do-lijst* staan. Dit kan via de zijbalk (icoontje dat op een boekje lijkt rechts naast de gekleurde Q in de linkerbovenhoek) als je in de testafname zit. Als je niet meer in de testafname zit dan kom je terug in de testafname door op het tabblad *Batterij* de subtest waar *Hervat* (als er nog niet-afgenomen subtest zijn) of *Beoordelen* (als alle subtests zijn afgerond) bij staat aan te tikken. Zoek in de zijbalk het item op dat je wilt aanpassen en druk daarop. Bij items uit verbale subtests kun je ook de audio-opname hier terug luisteren. Bovenstaande blijft mogelijk zolang de testafname nog op de iPad staat.

## Leeftijd van de cliënt aanpassen

Het kan gebeuren dat je voor/tijdens/na de testafname op de iPad ziet dat je de geboortedatum van de cliënt verkeerd hebt ingevoerd, waardoor de leeftijd van de cliënt niet meer klopt. Als de afname nog op de iPad staat dan kun je de geboortedatum altijd nog aanpassen. Tik hiervoor op de geboortedatum op het tabblad *Informatie* en pas hem

aan. De nieuwe leeftijd wordt echter niet direct toegepast op de subtests die al afgenomen zijn. Om dit wel het geval te laten zijn dien je per subtest een item te openen in de zogenaamde 'review-modus'. Dit werkt als volgt. Ga naar het tabblad *Batterij* en tik daar op de subtest waar *Hervat* of *Beoordelen* bij staat, zo kom je terug in de testafname. Open vervolgens de zijbalk (zie ook punt 3) en open in de zijbalk van alle afgenomen subtests één item (en tik telkens weer op *Gereed*). De aangepaste leeftijd zal dan toegepast worden op deze subtests. Als je daarna synchroniseert dan kun je in Central een scorerapport met de aangepaste leeftijd genereren.

## Houd alles up-to-date

Voor een optimale gebruikerservaring is het belangrijk om alles up-to-date te houden. Wat houdt dit precies in? Hieronder een snelle checklist:

1. Staat de meest recente versie van besturingssysteem iPadOS op de iPad's? Controleer dit bij: Instellingen → Algemeen → Software-update.
2. Staat de meest recente versie van de Assess-app op de iPad's? Controleer de Apple App Store regelmatig voor updates.
3. Start de iPad's met enige regelmaat opnieuw op en log in in de app met de wifi aan. Zo mis je geen content-updates.

Zorg ervoor dat je bovenstaande op beide iPad's doet.

## iPad's delen

Het is goed mogelijk om binnen een organisatie iPad's met elkaar te delen. Wanneer je met meerdere gebruikers gebruik maakt van dezelfde iPad's dan is het wel belangrijk om voordat je de iPad's aan een collega doorgeeft nog een keer op synchroniseren (Sync) te drukken en daarna uit te loggen uit de app. Zo ziet de collega die de iPad's na jou gebruikt niet jouw cliëntgegevens.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat afnames lokaal worden opgeslagen op de iPad die je tijdens de afname als testleider-iPad hebt gebruikt. Als je op een later moment nog audio-opnames wilt terugluisteren en scores wilt aanpassen dan zul je dezelfde iPad als waar je de test mee afgenomen hebt erbij moeten pakken.

Ook als je iPad's deelt zul je deze up-to-date moeten houden, maak daar goede afspraken met elkaar over zodat dit er niet bij inschiet.

## Afnames verwijderen

De Assess-app op de iPad is niet bedoeld als eeuwige opslagplek voor al je testafnames. Verwijder afgeronde testafnames dan ook met enige regelmaat van de iPad om te

voorkomen dat de opslagruimte van de iPad vol raakt. Verwijder afnames wel pas wanneer je er zeker van bent dat je er niks meer in hoeft te wijzigen. Alleen in de app kun je namelijk audio-opnames terugluisteren, scores aanpassen, normgroep aanpassen en de leeftijd van de cliënt aanpassen. Zodra je een testafname van de iPad verwijdert dan worden de audio-bestanden verwijderd en de scores, leeftijd en normgroep worden definitief. Bedenkt voor jezelf dus een goed moment waarop je met een gerust hart een afname van de iPad kunt verwijderen.

De online omgeving Central (qiactive.com) is wel bedoeld als opslagplek. Hier blijven alle afnamegegevens beschikbaar, ook de ruwe afnamegegevens in de vorm van het item-niveau scorerapport.

Let op: als je de Assess-app verwijdert van de iPad dan gaan ook alle afnamegegevens die op dat moment in de app staan verloren. Als je iPad's deelt ook de afnamegegevens van de andere gebruikers.